

Nerivio®

מדריך להתחלה מהירה



theranica

תחילת השימוש



תודה על הבחירה להשתמש במכשיר **Nerivio®** - מכשיר נירומודולציה חשמלית מרוחקת. המכשיר החדש יסייע בהקלה בתסמיני המיגרנה. לפני השימוש במכשיר, יש לעיין בכל הוראות המוצר ובהדרכות האינטראקטיביות מאפשרות גישה מהירה להבטים חשובים ולמגבלות של המכשיר. יש לשמור על המדריך להתחלה מהירה זמין לשימוש עתידי. המדריך למשתמש כולל את כל מידע הבטיחות והוראות השימוש. המדריך למשתמש זמין במסך העזרה באפליקציית **Nerivio®** או ב- www.nerivio-il.co.il. ניתן לבקש גרסה להדפסה של המדריך למשתמש על ידי יצירת קשר עם [Daphnemed](mailto:info@daphnemed.com) ב- info@daphnemed.com.

הערה: **Nerivio®** משווק על פי מרשם רופא בלבד. יש להשתמש במכשיר אך ורק אם יש לך מרשם תקף ולאחר התייעצות עם רופא. יש להשתמש במכשיר בהתאם להתוויות השימוש המתוארת במדריך זה.

תנאי שימוש

- התוויות שימוש**
מכשיר ה- **Nerivio®** מיועד לטיפול אקוטי במיגרנה עם או בלי הילה (אאורה) בחולים בני 12 שנים ומעלה. המכשיר משווק על פי מרשם רופא, מיועד לשימוש עצמי, לשימוש בסביבה ביתית עם התחלת כאב הראש של המיגרנה או ההילה (אאורה).
- התוויות נגד (אין אזור להשתמש במכשיר):**
1. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם אי ספיקת לב (CHF), מחלות לב חמורות או מחלות חמורות בכלי דם מוחיים.
 2. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם אפילפסיה בלתי נשלטת.
 3. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם שתל של מכשיר רפואי פעיל, כגון קוצב לב, מכשיר שמיעה מושתל, או כל מכשיר שתל אלקטרוני. שימוש זה עלול לגרום לשוק חשמלי, להפרעה חשמלית או פציעות חמורות או מצבים רפואיים אחרים.

מידע בטיחות חשוב

אזהרה: מציינת מצב עם פוטנציאל סיכון אשר אם לא ימנעו ממנו עלול להסתיים בפציעה רצינית או מוות.

- ⚠ אין לנסות לבצע כל פעולה לפני שקוראים בעיון את כל ההוראות.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר על הלב, הצוואר, הראש או כל מקום אחר בגוף שאינו הזרוע העליונה, מכיוון שהדבר עלול לגרום להתכווצויות שרירים קשות וכתוצאה מכך סכנה של דרכי הנשימה, קשיי נשימה, או השלכות שליליות על קצב הלב או לחץ הדם.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר על עור פגוע, כגון פצעים פתוחים או פריחות, או מעל אזורים נפוחים, אדומים, נגועים או מודלקים, או פריחות על העור או עור שברירי על הזרוע העליונה במקום הטיפול.
- ⚠ אין לחלוק את המכשיר עם אנשים אחרים. המכשיר מיועד לשימוש אישי כדי למנוע העברת מחלות עור או כל מחלה מדבקת.
- ⚠ אין לפרק, למעך, לשרוף או לגרום לקצר בסוללה. דבר זה עלול לגרום לשריפה, פציעה, כוויות או סכנת אחרות.

אמצעי זהירות: מצוין מצב שעלול להיות מסוכן במידה ולא יימנעו ממנו ועלול לגרום לפגיעה קלה או בינונית למשתמש או למטופל, או נזק לציוד או לרכוש אחר.

- ⚠ החוק במדינת ישראל מגביל מכשיר זה למכירה על ידי רופא או בהוראתו של הרופא.
- ⚠ אין למקם את המכשיר על אזורי עור עם בעיה תחושתית. אם זרוע עליונה אחת אינה רגישה לתחושה פיזית, יש להשתמש בחלק העליון של הזרוע השנייה.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר מעל או בסמיכות לנגעים סרטניים.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר על זרוע עם שתל מתכתי. במקרים כאלה, יש לשקול להשתמש בו על הזרוע העליונה השנייה.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר בזמן הניהיג, רכיבה, או בזמן תפעול כל כלי רכב או מכונות.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר על עור רטוב או בזמן מקלחת, בעת רחצה, במהלך אימון בעת הזעה או בתנאי לחות גבוהה.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר בנוכחות ציוד ניטור אלקטרוני (למשל מכשיר ניטור לב, התראות ECG).
- ⚠ אין להשתמש במכשיר בסביבת דימות תהודה מגנטית MRI.
- ⚠ ההשפעות ארוכות-הטווח של שימוש כרוני במכשיר אינן ידועות.
- ⚠ השימוש במכשיר לא הוערך בנשים הרות ובאנשים שטרם מלאו להם 12.

הבטיחות והיעילות של המכשיר לא הוערכו למטרת טיפול מניעתי של כאבי מיגרנה. אין להשתמש במכשיר מעבר לתאריך התפוגה שלו.

יש לבדוק את המכשיר ולוודא שאין בו פגמים, לכלוכים, או חומר אחר בלתי מזוהה. במידה והמכשיר פגום, מלכלוך או יש עליו חומר לא מזוהה, נג לא להשתמש בו וליצור קשר עם שירות לקוחות של היצרן במידה והמכשיר פגום, אין לגעת בחלקים אלקטרוניים חשופים.

אין להשתמש במכשיר אם האלקטרודות התלכלכו או ניזוקו במידה משמעותית.

יש לשמור את המכשיר ע"פ תנאי האחסון המומלצים בספר ההפעלה על מנת למנוע נזק למכשיר אין להתחיל טיפול לפני שמניחים את המכשיר על הזרוע.

במידה והמכשיר אינו מתפקד, יש להסיר את המכשיר מהזרוע וליצור קשר עם שירות לקוחות. מומלץ שהמסארטפון שלך יהיה מוגן על ידי יסמסה (או נגננון בטיחות אחר) כדי להימנע מאנשים לא רצויים ופעילו את המכשיר.

הפרעה לחיבור Bluetooth עולה להתרחש בסביבת ציוד שפולט RF (למשל מיקרוגל, נתבים, התקני Wi-Fi).

כדי להפחית את אובדן הלחות למינימום, בזמן שלא חל שימוש, יש לשמור את האלקטרודות מכוסות עם הכיסוי המגן המסופק עם האלקטרודות, ויש לאחסן את המכשיר באריזה המקורית.

אין להשאף את המכשיר ללחות גבוהה. במידה והתרחשה חשיפה, יש לייבש את המכשיר מהר ככל האפשר.

לפני או אחרי טיפול, יש להרטיב את האלקטרודות בעזרת האצבעות תוך שימוש בטיפות מים בכדי לשפר את ההצמדה שלהן לפני העור.

אין לנקות את המכשיר עם סבון, אלכוהול, אין לטבול אותו במים או לקרצף אותו עם חומר שיוף. אין לפרק או לשנות את המכשיר באופן עצמאי.

אין לנסות להטעין מחדש או לנתק את הסוללה.

יש לשמור את המכשיר מחוץ להישג ידם של תינוקות, פעוטות, ילדים וחיות מחמד.

המכשיר עושה שימוש בטכנולוגיית Bluetooth, ולכן זו יכולה להתקל בהפרעות על ידי ציוד אחר המשתמש בטכנולוגיית RF, גם אם הציוד האחר עומד בדרישות פליטת CISPR.

אין להשתמש במכשיר בסמיכות לציוד אחר ואין לערום אותו על גבי ציוד אחר, ואם חיוני להשתמש במכשיר כשהוא מונח בערימה אחת עם מכשירים אחרים, או בסמיכות אליהם, יש לפרק על ה- **Nerivio®** כדי לוודא תפעול תקין בקונפיגורציה שבה הוא אמור להיות בשימוש.

אין להשתמש במכשירים המייצרים שדות חשמליים או אלקטרומגנטיים, בסמיכות למכשיר ה- **Nerivio®**. התוצאה של דבר זה עלולה להיות פעילות לא תקינה של המכשיר ויצירת מצב שעלול להיות לא בטוחות. על מנת להפחית את ההפרעה אלקטרומגנטית, מומלץ לשמור על מרחק מינימלי של 30 ס"מ (12 אינצ'ים) בין המכשיר ומכשירים אחרים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית. יש לוודא פעילות תקינה של המכשיר במידה והמרחק קצר יותר. במהלך בדיקת חסונות, המכשיר פעל באופן תקין.

תופעות לוואי

במהלך הטיפול יתכן ותורגש תחושה זמנית של חמימות, עקצוצים מקומיים, חוסר תחושה בזרוע, כאב בדורע, או אדמומיות בעור, אשר אמורים להיעלם זמן קצר לאחר סיום הטיפול.

יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם תופעות אלו נמשכות, אם כאב הראש מחמיר, אם מתפתחת תגובה אלרגית, או אם עולה חשש אחר. אם התרחשה תקרית חמורה הקשורה למכשיר, יש לדווח זאת ליצרן ולרשות המאמימה על פי המדינה בה אתם נמצאים.

תכולת האריזה



מכשיר **Nerivio®** (יח' אחת). המכשיר מיועד ל-12 טיפולים. שקית נסיעה (יח' אחת)

רצועת הארכה (יח' אחת) רצועת זרוע (יח' אחת)

כיצד מרגיש הטיפול?

המכשיר משדר זרמים (פולסים) חשמליים. יתכן ותורגש תחושה חזקה בתחילה, אך זו בדרך כלל תפחת לתחושה נוחה לאחר מספר דקות.

הכנה

שלב 1: התקנת אפליקציית Nerivio®

1. יש להוריד ולהתקין את אפליקציית Nerivio מה- App store או מה- Goggle play (ניתן למצוא את דרישות המסארטפון ב- www.nerivio-il.co.il).
2. יש לפתוח את האפליקצייה (יישומון) ולהתחבר או לפתוח חשבון. יש לעקוב אחר הוראות האפליקצייה.

שלב 2: חיבור המכשיר לאפליקצייה

1. יש להדליק Bluetooth במכשיר המסארטפון שלך.
2. יש להדליק את המכשיר. אור ירוק מבהבה לאט (בעיקר דולק) מצוין כי המכשיר דולק.
3. יש לחבר את המכשיר לאפליקצייה תוך שימוש בהוראות המוצגות באפליקצייה. המכשיר והמסארטפון אמורים להיות בקירבה של פחות מ 2.5 ס"מ (כאינץ' אחד). התקבל הדעה על המסך כאשר החיבור בוצע בהצלחה. אור ירוק מבהבה במהירות מצוין כי המכשיר מחובר לאפליקצייה.

שימוש במכשיר


שלב 1: מיקום המכשיר על הזרוע וכריכת רצועת הזרוע סביב המכשיר

יש להסיר פרטי כיגוד צמודים או שרזול מופשל צמוד מאחת הזרועות. אין להניח את המכשיר על בגדים. המכשיר אמור להיות מונח על עור יבש, נקי, תקין ובריא.


1. יש להדליק את המכשיר.
2. יש להסיר את הכיסוי המגן ולשמור אותו לאחסון המכשיר.
3. יש להניח את המכשיר על החלק החיצוני של החלק העליון של הזרוע. המכשיר אמור להיות מסוקם באמצע בין המרפק לכתף.



4. יש להתאים את רצועת הזרוע למידתך. ישנן 4 מידות מהן ניתן לבחור (S, M, L, XL). יש לחבר את רצועת הארכה לרצועת הזרוע למידות L ו- XL.
5. יש להכניס את הרצועה לאבזם במידתך.

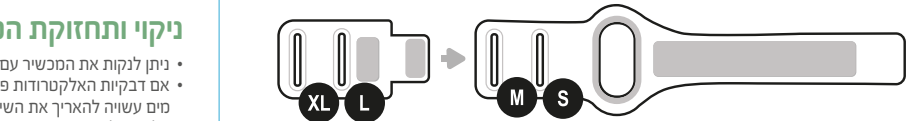

6. יש לכרוך את רצועת הזרוע מסביב למכשיר על הזרוע ולהדק את הרצועה. רצועת הזרוע תשפר את המגע בין המכשיר לעור.
5. יש להכניס את הרצועה עם מים וסבון בלבד. אין להשתמש בחומרים מלבינים. אין לייבש במייבש כביסה, אין לנהיץ.

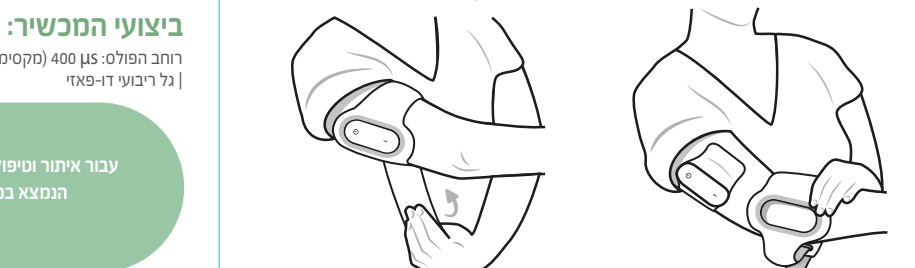

שלב 2: התחלת טיפול

להשגת תוצאות יעילות, יש להתחיל את הטיפול מוקדם ככל האפשר, ותמיד להתחיל תוך 60 דקות מסועד התחלת כאב המיגרנה או ההילה (אאורה).

1. יש לוודא כי המכשיר פועל ולאחר מכן לפתוח את האפליקצייה על מנת לוודא שהמכשיר והאפליקצייה מחוברים.
2. יש ללחוץ על 'התחלה'. הטיפול יתחיל כעת ויעצור אוטומטית אחרי 45 דקות. הבהוב איטי (בעיקר כבוי) של אור ירוק מעיד על כך שהמכשיר משדר פולסים חשמליים.
3. יש להגדיר את רמת עוצמת הטיפול כך שתורגש בצורה חזקה אך נוחה ולא כואבת. דבר זה חשוב על מנת למקסם את התועלת הקלינית של הטיפול.
- יש להעלות את עוצמת הטיפול תוך שימוש בכפתור ה- '+'.
• כאשר הגירוי החשמלי גורם לכאב ו/או לתחושה לא נעימה, יש להפחית את העוצמה לרמה הקודמת על ידי שימוש בכפתור ה- '-'.
4. במהלך הטיפול, שאלות על התסמינים למיגרנה יוצגו באופן אוטומטי. ניתן לתעד את תסמיני המיגרנה ביומן, או לדלג על שלב זה על ידי הקשה על 'דלג'.
5. ניתן להשהות את הטיפול ל- 5 דקות על ידי הקשה על כפתור ההשהיה. יש להקיש על 'חדש טיפול' על מנת להמשיך או 'הפסק טיפול' בכדי לעצור את הטיפול הנוכחי. ניתן להשהות כל טיפול 3 פעמים בלבד.
6. על מנת לעצור טיפול, יש להקיש על כפתור ההשהיה ואז על 'הפסק טיפול'.
7. כשהטיפול הושלם, יש להסיר את רצועת הזרוע ואת המכשיר מהזרוע.
8. המכשיר יכבה אוטומטית דקה אחרי שהטיפול הסתיים (האור הירוק יכבה). יש להחזיר את הכיסוי המגן על האלקטרודות ולהניח את המכשיר בקופסה שלו או בתיק הנסיעה על מנת לאחסנו עד לטיפול הבא.



ניקוי ותחזוקת המכשיר

- ניתן לנקות את המכשיר עם מטלית יבשה, למעט אזור האלקטרודות.
- אם דבקיות האלקטרודות פוחתת, הרטבת גיל האלקטרודה בעדינות בעזרת האצבעות תוך שימוש בטיפות מים עשויה להאריך את השימוש בהן.
- על מנת להקטין את אובדן לחות האלקטרודות, כאשר הן לא בשימוש יש לכסות אותן בכיסוי המגן ולהכניס את המכשיר לארזיתו המקורית.
- ניתן לשתוף את הרצועה עם מים וסבון בלבד. אין להשתמש בחומרים מלבינים. אין לייבש במייבש כביסה, אין לנהיץ.

ביצועי המכשיר:

רוחב הפולס: 400 µs (מקסימום) | תדירות: 100-200 Hz (מקסימום) | זרם: 40mA (מקסימום)
| גל ריבועי ריבועי-פאזי

זקוקה לעזרה?

עבור איתור וטיפול בבעיות או אם יש צורך בסייע נוסף, יש לעיין במדריך למשתמש הנמצא במסך העזרה באפליקצייה או ליצור קשר עם שירות לקוחות info@daphnemed.com
טלפון 077-3630400 או 099-9002099



Nerivio®

دليل المستخدم



theranica

دليل المستخدم



شكراً لاستخدامك جهاز التحفيز العصبي الكهربي عن بُعد من **Nerivio®**. سيساعد جهازك الجديد في التخفيف من أعراض الشقيقة أو الصداع النصفي. قبل استخدام الجهاز، راجع كل تعليمات المنتج والبرامج التعليمية التفاعلية على تطبيق **Nerivio®**. يمنحك دليل المستخدم QuickStart والبرامج التعليمية التفاعلية وصولاً سريعاً إلى المجالات والقيود المهمة للجهاز. يجب أن تبقى دليل المستخدم QuickStart متوفراً للرجوع إليه في المستقبل. يتضمن دليل المستخدم كافة معلومات السلامة وإرشادات الاستخدام. يتوفر دليل المستخدم في شاشة المساعدة الخاصة بتطبيق **Nerivio®** أو على عنوان الموقع التالي www.nerivio-il.co.il. يمكن طلب نسخة قابلة للطباعة من دليل المستخدم عن طريق الاتصال ب **Daphnemed** على العنوان info@daphnemed.com

ملاحظة: **Nerivio®** هو جهاز ملزم بوصفة طبية. استخدم هذا الجهاز فقط إذا كنت تملك وصفة طبية صالحة وبعد استشارة إخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. استخدم الجهاز وفقاً لدواعي الاستخدام الموضحة في هذا الدليل.

شروط الاستعمال

دواعي الاستعمال

يشار إلى أن **Nerivio®** يستعمل لعلاج الشقيقة أو الصداع النصفي الحاد مع أو بدون أورة أو النسيمة (اضطراب إدراكي للحواس) لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر، يتم تسويق الجهاز بناء على وصفة طبية، وهو جهاز يدار ذاتياً في بيئة يتيمة عند بداية صداع الشقيقة أو الأورة.

موانع الاستعمال (من لا يجب عليه أن يستخدم هذا الجهاز؟)

1. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من فشل القلب الاحتقاني أو أمراض القلب الحادة أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية.
2. لا يجب استخدام الجهاز من قبل الأشخاص المصابين بصرع غير مسيطر عليه.
3. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين لديهم أجهزة طبية نشطة قابلة للزرع مثل منظم ضربات القلب، الأداة المساعدة على السمع والقابلة للزرع، أو أي جهاز إلكتروني مزروع. مثل هذا الاستخدام قد يسبب حدوث صدمة كهربية، تداخل كهربي أو إصابات خطيرة أو حالات طبية.

معلومات هامة للسلامة

تحذير: يشير إلى موقف ينطوي على خطورة محتملة، وإذا لم يتم تجنبه، فقد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة.

- ⚠ لا تحاول تنفيذ أي إجراء قبل قراءة جميع التعليمات بعناية.
- ⚠ لا تستخدم الجهاز على القلب، الصدر، الرقبة، الرأس، أو أي مكان آخر في الجسم غير الذراع العلوي، لأن هذا قد يسبب تشنجات عضلية حادة تؤدي إلى إغلاق مجرى الهواء، صعوبة في التنفس، أو آثار سلبية على انتظام ضربات القلب أو ضغط الدم.
- ⚠ يجب عدم وضع الجهاز على عضو يعاني من حالة جلدية، مثل الجروح المفتوحة أو طحج جلدي، أو على مناطق متورمة، احمرار، المناطق الملتهبة أو المصابة، أو الجلد الهش على ذراعك العلوي في مكان العلاج.
- ⚠ لا تشارك الجهاز مع أشخاص آخرين. الغرض من الجهاز هو استخدامه من قبل شخص واحد لتجنب الإصابة بأمراض الجلد أو أي مرض معد.
- ⚠ لا تقم بتفكيك البطارية، أو سحقها، حرقها، أو قصر الدائرة الكهربائية. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق، إصابة، حروق، أو مخاطر أخرى.

تحذير: يشير إلى موقف ينطوي على خطورة محتملة، وإذا لم يتم تجنبه، فقد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة.

- ⚠ يقيد القانون الإسرائيلي بيع هذا الجهاز فقط من قبل الطبيب أو بناءً على أمر منه
- ⚠ يجب عدم وضع الجهاز على مناطق الجلد التي تنقرق إلى الإحساس الطبيعي. إذا كان أحد الذراعين العلويين غير مستشعر للإحساس البدني، فاستخدم الذراع العلوي الآخر
- ⚠ لا تستخدم الجهاز فوق أو بالقرب من الأوقات السرطانية
- ⚠ لا تستخدم الجهاز على ذراع مع غرس معدني. في مثل هذه الحالات، فكر في استخدامه على الذراع العلوي الآخر
- ⚠ لا تستخدم الجهاز في وقت واحد مع جهاز تحفيز كهربي آخر
- ⚠ لا تستخدم الجهاز أثناء القيادة، ركوب الدراجات، أو تشغيل أي مركبة أو آلية
- ⚠ لا تستخدم الجهاز على الجلد الرطب أو عند الاستحمام أو أثناء ممارسة الرياضة، أثناء التعرق أو في الرطوبة العالية
- ⚠ لا تستخدم الجهاز في وجود معدات مراقبة إلكترونية (مثل شاشات القلب وأجهزة إنذار ECG)
- ⚠ لا تستخدم الجهاز في بيئة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
- ⚠ الأثار طويلة الأجل للاستخدام المزمع للجهاز غير معروفة
- ⚠ لم يتم تقييم الجهاز للاستخدام على النساء الحوامل والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً

- ⚠ لم يتم تقييم سلامة وفعالية الجهاز للعلاج الوقائي من الشقيقة أو الصداع النصفي
- ⚠ لا تستخدم الجهاز بعد تاريخ انتهاء الصلاحية
- ⚠ افحص الجهاز وتأكد من عدم احتوائه على عيوب أو أوساخ أو مواد مجهولة أخرى. في حالة تلف الجهاز أو إتساخه أو وجود مواد مجهولة عليه، يرجى عدم استخدامه والاتصال بخدمة عملاء الشركة المصنعة.
- ⚠ في حالة تلف الجهاز، لا تلمس الأجهزة الإلكترونية المكشوفة
- ⚠ لا تستخدم الجهاز إذا أصبحت الأقطاب الكهربائية متسخة أو تالفة بشكل كبير
- ⚠ يجب تخزين الجهاز وفقاً لظروف التخزين الموصى بها في دليل التشغيل من أجل منع تلف الجهاز.

- ⚠ لا تبدأ العلاج قبل وضع الجهاز على ذراعك
- ⚠ في حالة حدوث خلل في الجهاز، أزل الجهاز من ذراعك واتصل بخدمة الزبائن
- ⚠ يوصى بحماية هاتفك الذي بكلمة مرور (أو آلية أمنية أخرى) لمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم من تنشيط الجهاز
- ⚠ قد يحدث تداخل في اتصال البلوتوث بالقرب من المعدات التي ينبعث منها التردد اللاسلكي RF (مثل الميكروويف وأجهزة التوجيه وأجهزة Wi-Fi)
- ⚠ للحد من فقدان الرطوبة، عند عدم الاستخدام، يجب تغطية الأقطاب الكهربائية بغشاء واقي ويجب تخزين الجهاز في عبوته الأصلية

- ⚠ لا تعرض الجهاز لرطوبته عالية. إذا تعرض الجهاز، جفف الجهاز في أقرب وقت ممكن
- ⚠ قبل العلاج أو بعده، افرك الأقطاب الكهربائية بإصبعك باستخدام قطعة ماء لتحسين قدرتها على الالتصاق
- ⚠ لا تقم بتنظيف الجهاز بالصابون، الكحول، الغمر بالماء، أو التنظيف/الفرك بالمواد الكاشطة
- ⚠ لا تقم بتفكيك الجهاز أو تعديله بنفسك
- ⚠ لا تحاول إعادة شحن البطارية أو فصلها
- ⚠ احتفظ بالجهاز بعيداً عن تناول الأطفال الرضع، الأطفال الصغار، الأطفال والحيوانات الأليفة
- ⚠ يستخدم الجهاز تقنية البلوتوث؛ لذلك قد تتداخل مع معدات أخرى تستخدم تكنولوجيا RF، حتى لو كانت المعدات الأخرى تتوافق مع متطلبات انبعاثات CISPR

- ⚠ يجب عدم استخدام الجهاز بجوار الأجهزة الأخرى أو الأجهزة المكسدة، وإذا كان الاستخدام المجاور أو المتكدر ضرورياً، فيجب الانتباه على **Nerivio®** للتحقق من التشغيل العادي في الترتيب الذي سيتم استخدامه فيه

- ⚠ لا تستخدم الأجهزة التي تولد مجالات كهربية أو كهرومغناطيسية قوية، بالقرب من جهاز **Nerivio®**. قد ينتج عن هذا تشغيل غير صحيح للجهاز وإنشاء موقف يحتمل أن يكون غير آمن. من أجل تقليل خطر التداخل الكهرومغناطيسي EM، يوصى بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن 30 سم (12 بوصة) بين الجهاز وغيره من الأجهزة الكهرومغناطيسية المشعة. تحقق من التشغيل الصحيح للجهاز في حالة كانت المسافة أقصر. خلال اختبارات المناعة يعمل الجهاز بشكل طبيعي

ردود الفعل السلبية

أثناء العلاج، قد يواجهك إحساساً مؤقتاً بالدفء، الوخز الموضعي، خدر في الذراع، وجع في الذراع أو احمرار الجلد، والذي يجب أن يختفي بعد فترة قصيرة من انتهاء العلاج

يجب استشارة الطبيب المعالج إذا استمرت هذه الأعراض، إذا ازدادت حدة ألم الرأس، إذا ظهرت حساسية، أو في وجود أي مخاوف أخرى. في حالة حدوث حادثة خطيرة تتعلق بالجهاز، يجب إعلام المصنع بالأمر وأيضاً السلطة المعنية بحسب الدولة التي تتواجدون فيها.

محتويات الحزمة



1 جهاز **Nerivio®**. الجهاز مخصص ل 12 علاج



1 شريط ذراع

ماذا تشعر في العلاج؟

ينقل الجهاز نبضات كهربية. قد تشعر بإحساس قوي في البداية، لكنها عادة ما تتلاشى إلى مستوى مريح بعد بضع دقائق.

التحضير

الخطوة 1: تثبيت تطبيق Nerivio®

1. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق **Nerivio®** من متجر التطبيقات **Google Play** أو **App Store**. (من الإنكان أيجاز متطلبات الهاتف الذي في - www.nerivio-il.co.il)
2. يجب فتح التطبيق والاتصال أو فتح حساب، يجب العمل بموجب تعليمات التطبيق.

الخطوة 2: توصيل الجهاز بالتطبيق


1. قم بتفعيل Bluetooth على هاتفك الذي.
2. قم بتشغيل الجهاز. يشير الضوء الأخضر الوامض (غالبًا) إلى أن الجهاز في وضع التشغيل.
3. قم بتوصيل الجهاز بالتطبيق باستخدام تعليمات التطبيق. يجب أن يكون الجهاز والهاتف الذي بالقرب من بعضهما البعض على مسافة أقل من 1 بوصة (- 2.5 سم). سيتم إخطارك عند إنشاء اتصال. يشير الضوء الأخضر الوامض بسرعة إلى أن الجهاز متصل بالتطبيق.

استعمال الجهاز

الخطوة 1: ضع الجهاز على الذراع ولف شريط الذراع حوله

قم بإزالة الملابس الضيقة أو الأكمام المشنبة بإحكام من أحد ذراعيك. لا تضع الجهاز على الملابس. يجب أن يوضع الجهاز على جلد طبيعي، سليم، نظيف، جاف وصحي.


1. قم بتشغيل الجهاز.
2. قم بإزالة الشريط الواقي واحتفظ به لتخزين الجهاز.

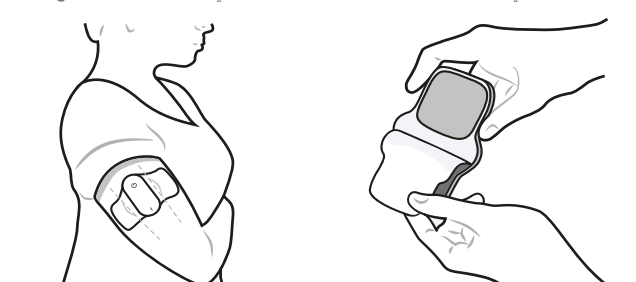

4. اضبط شريط الذراع ليلائم حجم الذراع. هناك 4 أحجام بإمكانك الاختيار بينها (S, M, L, XL). يمكنك شيك الوصلة أو التمديد إلى شريط الذراع لأحجام L و XL.



6. لف شريط الذراع حول الجهاز على ذراعك واقفل الشريط. شريط الذراع سيحسن الاتصال بين الجهاز وبشريك.
5. أدخل الشريط على مشبك من الحجم الخاص بك.

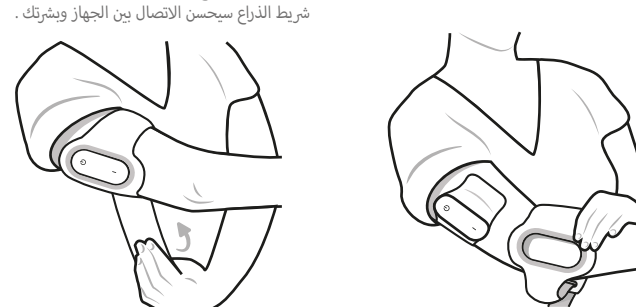

الخطوة 2: بدء جلسة العلاج

للحصول على نتائج فعالة، يجب أن تبدأ العلاجات في أقرب وقت ممكن ودائماً خلال 60 دقيقة من بداية الشقيقة أو الصداع النصفي أو الأورة.

1. تأكد من تشغيل الجهاز، افتح التطبيق وتأكد من توصيل الجهاز بنجاح.
2. انقر على "Start" (بدء). لقد بدأ العلاج الآن وسوف يتوقف تلقائياً بعد 45 دقيقة. يشير الضوء الأخضر الوامض (غالبًا إيقاف التشغيل) إلى تنشيط الجهاز.
3. اضبط مستوى شدة العلاج بحيث يكون قوياً ومريحاً وغير مؤلم. هذا مهم لتعظيم الفائدة أو التأثير الإيجابي للعلاج.
- ابدأ في زيادة كثافة التحفيز باستخدام الزر "+"
- عندما يكون التحفيز مؤلماً و / أو غير مريح،
- قم بتقليل الشدة إلى المستوى السابق باستخدام الزر "-".

4. أثناء العلاج، سيتم عرض الأسئلة المتعلقة بأعراض الشقيقة أو الصداع النصفي تلقائياً. يمكنك تسجيل أعراض الصداع النصفي في اليوميات أو تخطي ذلك عن طريق النقر على "تخطي".

5. يمكنك إيقاف جلسة العلاج لمدة 5 دقائق عن طريق النقر على زر الإيقاف المؤقت. انقر على "استئناف العلاج" للمتابعة أو "أوقف العلاج" لإيقاف جلسة العلاج الحالية. يمكن إيقاف كل جلسة مؤقتًا 3 مرات فقط.

6. لإيقاف العلاج، انقر على زر الإيقاف المؤقت ومن ثم انقر على "إيقاف العلاج".

7. عند اكتمال العلاج، انزع شريط الذراع والجهاز من ذراعك. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد دقيقة واحدة من انتهاء الجلسة (سوف ينطفئ الضوء الأخضر).

8. قم بتطبيق الشريط الواقي على الأقطاب الكهربائية وضع الجهاز في صندوقه أو في حقيبة السفر لتخزينه للاستخدام التالي.

تنظيف وصيانة الجهاز

- من الممكن تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش جافة، باستثناء منطقة الأقطاب الكهربائية.
- إذا خفت لزوجة الأقطاب الكهربائية، من الممكن تبديل الأصعب بقليل من الماء وتنظيف الأقطاب الكهربائية بلطف.
- يجب تغطية الأقطاب الكهربائية عند نهاية الاستعمال ووضع الجهاز داخل العلبة الأصلية وذلك للحفاظ على لزوجة الأقطاب الكهربائية.
- من الممكن غسل الحزام بالماء والصابون فقط، يمنع استعمال المواد المبيضة، يمنع استعمال الشاشة أو كوي الحزام.

إداء الجهاز

عرض النبض: 400µs (الحد الأقصى) | تردد: 100-200Hz (الحد الأقصى) | تيار: 40mA (الحد الأقصى)

موجبة رباعية دائرة ثنائية الطور

تحتاج الى مساعدة؟
لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على شاشة المساعدة للتطبيق أو الاتصال بدعم العملاء على info@daphnemed.com | 077-3630400 / 054-9002099



www.Nerivio-il.co.il
info@daphnemed.com